

DÉPISTAGE DU CANCER DE L'INTESTIN

Test de recherche de sang dans les selles

MODE D'EMPLOI

► Ouvrez la pochette de test, elle contient :

- 1 grande plaquette** avec 3 tests Hemoccult II®
- 6 spatules** en carton détachables
- 1 pochette de protection**
- 3 dispositifs** de recueil des selles

► Avant de commencer le test,

Collez sur la face arrière de la plaquette une étiquette code-barres figurant au recto de la prise en charge.

Si vous n'avez pas de prise en charge, complétez les informations demandées.



Vous devez effectuer le test sur 3 selles qui se suivent dans un délai de 5 jours.

► Pour le recueil des selles (matières fécales),

Utilisez un dispositif de recueil des selles. **Placez-le sur la cuvette en le coinçant sous la lunette.** Vous pouvez aussi utiliser du papier journal ou une assiette en carton.

Attention ! Pour garantir l'efficacité du test, la selle ne doit pas entrer en contact avec un liquide (eau, urine, javel)..



► Recueil des selles (suite)

Soulevez le volet nommé "selle 1".

Avec une spatule, prélevez l'équivalent d'un grain de riz et écrasez-le sur le **cadre A**. Avec une autre spatule, prélevez un 2^{ème} échantillon de même taille à un autre endroit de la selle et appliquez-le sur le **cadre B**.

Refermez le volet, indiquez **la date de prélèvement** et posez la plaquette dans un endroit sec et propre à température ambiante.

19°



Lors des 2 prochaines selles, **renouvelez l'opération**.

► Le test terminé :

- **Glissez la plaquette** avec les prélèvements dans la pochette de protection. Refermez la pochette en retirant la bande adhésive.
- **Vérifiez** d'avoir bien noté au verso de la prise en charge les coordonnées de votre médecin traitant ainsi que votre numéro de téléphone.
- **Placez les prélèvements et la prise en charge** dans l'enveloppe "prêt à poster" (adressée à l'Institut Pasteur de Lille) qui vous a été remise avec le test.
- **Postez l'enveloppe rapidement**. Les résultats vous seront adressés par courrier sous 10 jours.



CONSEILS PRATIQUES

- La réalisation du test ne requiert aucun régime alimentaire spécifique. Évitez toutefois de manger du boudin rouge lors de la réalisation du test.
- La prise régulière d'anticoagulant n'influence pas son résultat.
- Ne pas effectuer le test pendant la période des règles, lors de crises hémorroïdaires ou en cas de prise importante de vitamine C ou d'aspirine (> à 1 gramme).

Pour plus de renseignements,
n'hésitez pas à nous contacter
au **03 20 06 38 12**



ADCN
BP 10339 - 59026 LILLE Cedex
Tél. 03 20 06 38 12
E-mail. contact@adcn.fr

